


# Q-flex®

## GEPE Standard Ohrmarkenzange

Einziehanleitung für GEPE Q-flex® LabTag Gewebeohrmarken

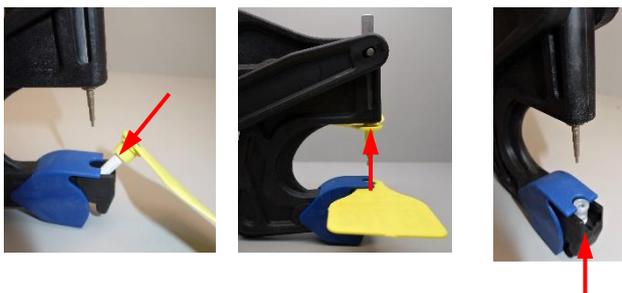

- Ohrmarkensatz wie abgebildet paarweise trennen.
- Schneidring und Dornspitze (bei Gewebemarken grün, bei Standardohrmarken silber) müssen zueinander passen.
- Lochteil von Dornteil trennen.
- Halteklappe durch Druck von unten anheben
- Lochteil unter die Halteklappe schieben. Dornteil auf Zangendorn stecken. Stanzhülse sauber halten, um Infektionen zu verhindern.
- Zange von der Ohrmarke abziehen. Der Probenbehälter verbleibt in der Probeaufnahme der Zange. Probenbehälter mit leichtem Druck von unten aus der Zange schieben.
- Leichtes drehen vom Lochteil prüfen, evtl. auseinanderziehen und endblocken.

Bei Bedarf Antiseptikum oder Desinfektionsspray verwenden, um Entzündungen zu vermeiden.

